


Dieses Dokument beschreibt das richtige Ausziehen von Einweghandschuhen

1. Schema zum richtigen Ausziehen von Handschuhen

Dieses Dokument beschreibt das kontaminationsfreie Ausziehen und Abwerfen von Einweghandschuhen.

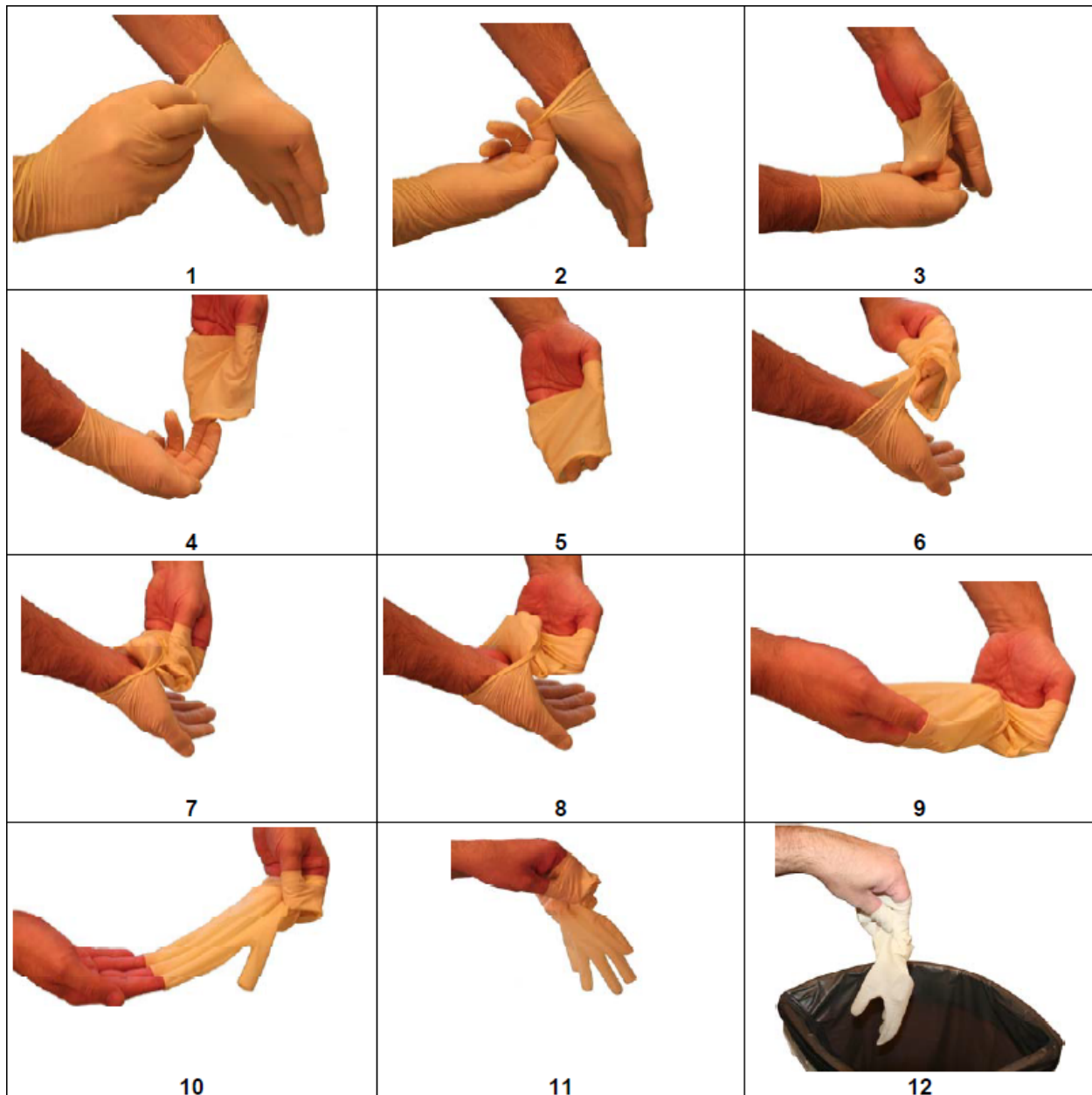

2. Erläuterung zur Bilderfolge

- Handschuhstulpe der dominanten Hand vorsichtig anheben, ohne die Haut zu berühren (Abb. 1).
- Mit Fingerkuppen in die Manschettenstulpe von außen einhaken (Abb. 2).
- Handschuh bis zur Fingermitte umstülpen;
- die Finger bleiben bis zu ihren Mittelgelenken in den Fingerlingen, die Innenseite des ausgezogenen Handschuhs schaut nach außen. (Abb. 3-5).
- Die Manschettenstülpe des zweiten Handschuhs mit Fingerkuppen der ersten Hand von außen einhaken, ohne die Haut zu berühren, analog umstülpen und abziehen (Abb. 6-10).
- Beide Handschuhe gemeinsam abwerfen (Abb. 11-12).

Achtung:

Handschuhe beim Abziehen nicht „schnalzen“ lassen (Kontaminationsrisiko durch Verspritzen!)
Nach dem Ausziehen der Handschuhe ist eine Händedesinfektion durchzuführen