

## Dieses Dokument beschreibt das richtige Anlegen von Mund-& Nasenschutzmasken (FFP2 und FFP3)

### 1. Schema zum richtigen Anlegen von FFP Schutzmasken



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

Mit den Fingerspitzen beider Hände den Metallbügel der Maske vom Nasenrücken abwärts zu den Wangen an die Konturen des Gesichts anmodellieren. Den Bügel nur zu quetschen sorgt nicht für einen sicheren und dichten Schutz der Maske!



Schritt 4

Kräftig **Ausatmen!** Ein positiver Druck in der Maske muss spürbar sein. Bei Feststellen einer undichten Stelle positionieren Sie die Maske erneut (Haltebänder etc.)  
**Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.**



Schritt 5

Kräftig **Einatmen!** Wenn die Maske dicht sitzt wird sie an das Gesicht gepresst. Bei einem schlechten Sitz lässt dieser Anpressdruck sofort nach.  
**Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.**

Quelle Meduni Wien

### 2. Maskenwechsel

Masken sind zu wechseln:

- Bei Durchfeuchtung der Maske
- Nach Berührung mit kontaminierten Händen
- Bei sichtbarer Kontamination
- Nach Beenden der Tätigkeit und/oder Verlassen des Labors

**Achtung bei Abnahme der Masken:** nur Bänder anfassen und keinesfalls mit Handschuh Kopf berühren

Schutzmasken der Kl. FFP2 und FFP3 sind **gezielt und ressourcenschonend** einzusetzen! Für „normalen“ Umgang reichen MNS-Masken aus Textilien aus, um Tröpfchen Bildung zu vermeiden.